

# **Bedienungsanleitung**

## **Reanimationsbrett**



## **Achtung**

Die Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Lieferumfangs. Sie enthält wichtige Hinweise zur Wartung und zum Gebrauch dieses Produktes. Bewahren Sie diese deshalb gut auf und geben Sie diese bei einem Besitzerwechsel unbedingt an den neuen Eigentümer weiter.

**Bei diesem Produkt handelt es sich um ein medizinisches Produkt, das nur von eingewiesenem und regelmäßig auf das Produkt geschultem medizinischen Fachpersonal angewendet werden darf!**

## **Wichtige Hinweise**

Vor der Benutzung des Dönges Reanimationsbrett muss diese Bedienungsanleitung unbedingt vollständig gelesen werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir für Schäden, die aufgrund unsachgemäßer Benutzung oder Missachtung dieser Hinweise entstehen, keine Haftung übernehmen. Eine Verwendung im Einsatz darf erst erfolgen, wenn sich die Benutzer mit der richtigen und sicheren Handhabung vertraut gemacht haben. Wir empfehlen, die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieses Rettungsgeräts regelmäßig zu üben, um im Einsatzfall ein absolut sicheres Handling zu gewährleisten. Die gezeigten Anwendungsmöglichkeiten stellen keinerlei medizinische Empfehlungen dar!

## **Lieferumfang**

Überprüfen Sie sofort nach Erhalt den Lieferumfang. Fehlende Teile müssen innerhalb einer Woche nach Erhalt reklamiert werden. Nachträgliche Reklamationen werden nicht anerkannt. Folgende Teile sind im Lieferumfang enthalten:

- 1 Reanimationsbrett
- 1 Gebrauchsanweisung

## **Gewährleistung**

Wir garantieren die Mängelfreiheit des von uns gelieferten Produktes innerhalb der gesetzlichen Fristen. Eine Erfüllung dieser Gewährleistung erfolgt nach unserer Wahl durch Reparatur oder Ersatz des defekten Reanimationsbrettes. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Übergabe an den Kunden. Als Nachweis dient der Lieferschein oder die Rechnung des Lieferanten. Die Garantie beschränkt sich ausdrücklich auf Ersatz oder Reparatur des defekten Produkts. Etwaige Folgeschäden sind ausdrücklich ausgeschlossen. Jegliche Änderungen oder Reparaturen einer nicht von uns bevollmächtigten Stelle führen zum sofortigen Wegfall sämtlicher Garantie oder Gewährleistungsansprüche.

Die Lebensdauer des Reanimationsbrettes ist abhängig von der Pflege und der Nutzungshäufigkeit.

### **Kundendienst**

Reparatur- und Servicearbeiten dürfen nur durch von uns zertifizierte Servicestellen erfolgen. Sollten Sie Ersatz- oder Zubehörteile benötigen, verwenden Sie nur von uns freigegebene Teile. Bei Bestellung geben Sie unbedingt die Seriennummer des Reanimationsbrettes an. Zubehör und Ersatzteile erhalten Sie von:

#### **Dönges GmbH & Co. KG**

Jägerwald 11  
42897 Remscheid  
Telefon: 02191 / 5626-0  
Fax: 02191 / 5626-199  
Internet: [www.doenges-rs.de](http://www.doenges-rs.de)  
e-mail: [info@doenges-rs.de](mailto:info@doenges-rs.de)

### **Achtung**

Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen oder Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör können zu einer tödlichen Gefahr für Anwender oder der zu rettenden Person führen!

### **Technische Daten**

Material: Polyethylen (PE)  
Abmessungen: 60 x 40 cm  
Gewicht: 1400 g

### **Allgemeine Hinweise**

Das Reanimationsbrett ist die optimale Unterlage bei der Reanimation. Erspart zeitaufwändiges Umlagern aus Pflege- und Krankenbetten. Ermöglicht eine effektive Reanimation auch auf weichen Untergründen wie Matratzen. Ein wertvolles Hilfsmittel auch bei allen anderen Reanimationen. Die glatte Kunststoffoberfläche und zwei seitliche Handgriffe ermöglichen ein schnelles Platzieren am Patienten. Die ausgeformte Mulde sorgt für eine optimale Kopfüberstreckung.

### **Anwendung**

Prüfen Sie vor jeder Nutzung, ob das Reanimationsbrett sich in einwandfreiem Zustand befindet.

Heben Sie den Kopf, den Hals und die Schultern des Patienten an. Schieben Sie das Reanimationsbrett unter den Kopf, den Hals und die Schultern des Patienten. Der Kopf des Patienten muss in der

Mulde des Reanimationsbrettes legen. Achten Sie auf die Stellung des Reanimationsbrettes. Bringen Sie den Kopf des Patienten in eine Neigung nach Hinten, bevor Sie mit der Reanimation beginnen.

### **Pflege**

Reinigen Sie das Reanimationsbrett mit Wasser und mildem Reinigungsmittel nach jeder Nutzung und Lagern Sie es erst wieder ein, wenn es komplett trocken ist.

Bitte das Reanimationsbrett im Falle von Verschmutzungen durch Blut oder andere Körperflüssigkeiten nach der Reinigung desinfizieren.

### **Inspektion und Wartung**

Regelmäßige Inspektion und Wartung garantieren die schnelle und sichere Einsatzbereitschaft und sind Voraussetzung für größtmögliche Sicherheit von Patient und Bediener. Stellen Sie verbogene, zerrissene oder fehlende Teile fest, setzen Sie die das Reanimationsbrett sofort außer Betrieb.